

bonbone 取扱説明書

【軽涼サポーターひざ用】

柔軟なフィット性と保温性、吸汗性と速乾性を追求した膝用サポーターです。膝関節にもぴったりフィットし、膝の曲げ伸ばしをサポートします。商品についてご不明な点がございましたら、下記宛までご連絡下さい。

装着時間目安

使い始めは1～2時間程度装着し、不快感やかゆみがないか確認して下さい。慣れましたら半日から一日中お使い頂けます。就寝時はご使用をお避け下さい。

注意

- この取扱説明書に示した用途以外のご使用は怪我や破損の原因となりますのでお止め下さい。
- アレルギー体質・湿疹性・汗でかぶれやすい方のご使用はお避け下さい。
- 使用中に不快な症状を感じた時は、直ちに使用を中止して下さい。
- 熱に弱い素材を使っている為、火に近いところでの使用にはご注意ください。
- 製品の上には物は置かないで下さい。クロロプレンゴムの特徴である気泡がつぶれ、伸縮・保温性に影響を与えます。

洗濯方法

- 漂白剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けて下さい。
- 洗濯後の乾燥は、陰干しにして下さい。
- ※濡れた状態で放置すると、他の物に色移りする場合がありますのでご注意ください。

保管方法

- 直射日光や高温を避け、湿気の少ない風通しの良い場所に保管して下さい。

廃棄方法


- 本品は布製品です。通常可燃物として廃棄して下さい。
(地域により異なる場合がありますので詳しくは自治体へご確認ください。)

検品印	ダイヤ工業株式会社 CSセンター 〒701-0203 岡山市南区古新田1117-1 TEL(086)282-1245 FAX(086)282-1246
	Lot, No 406246


装着方法

QT03-33-R00

1 上下の確認を行います。

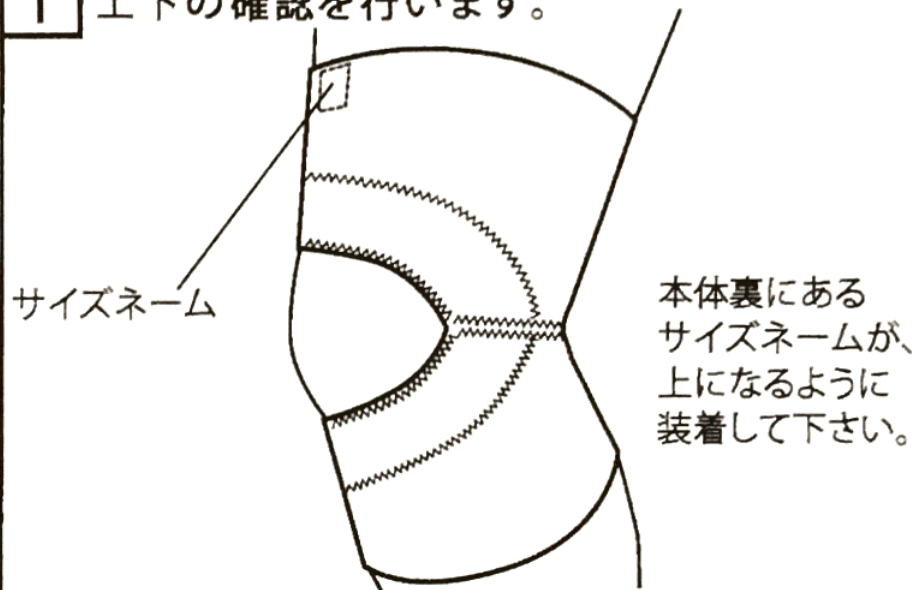

2 装着位置を合わせます。

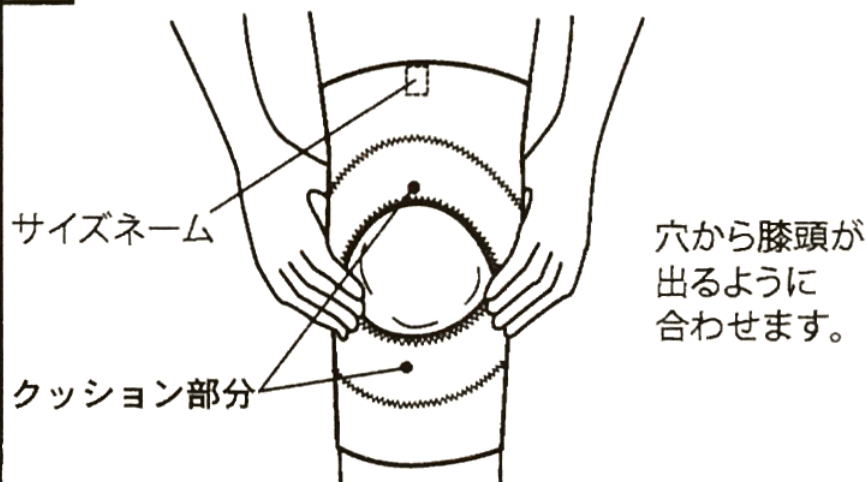

適用範囲	LL	膝上周囲 41～45cm 膝下周囲 34～37cm	L	膝上周囲 37～41cm 膝下周囲 31～34cm	M	膝上周囲 33～37cm 膝下周囲 29～31cm
------	----	------------------------------------	---	------------------------------------	---	------------------------------------