

# bonbone 取扱説明書


## 【MPスタビライザー】

補助ベルトを母指の付け根から手首に向かって8の字状に巻きつける母指の圧迫固定サポーターです。商品についてご不明な点がございましたら、下記宛までご連絡下さい。

### 装着時間目安

使い始めは1～2時間程度装着し、不快感やかゆみがないか確認して下さい。就寝時はご使用をお避け下さい。

装着方法（※図は右用になります。左用の場合は左右が反転します）

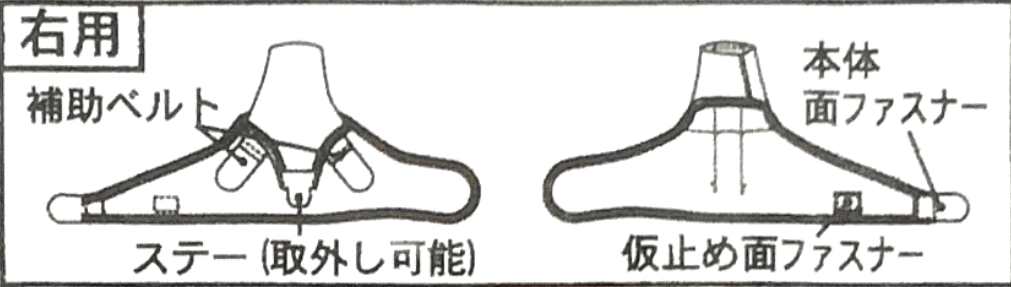

### 注意

- この取扱説明書に示した用途以外のご使用は怪我や破損の原因となりますのでお止め下さい。
- 面ファスナーを衣服に引掛けて傷付けないようにご注意下さい。
- 肌面には化学繊維を使用しております。万が一お肌に合わない場合は使用を中止し、専門医へご相談下さい。
- ベルトの締め過ぎにはご注意下さい。長時間装着する場合、圧迫などによる皮膚障害や血行障害がおこる場合もございますので、適宜装着し直して下さい。

### 洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し手洗いして下さい。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けて下さい。
- 洗濯後の乾燥は、陰干しにして下さい。

※濡れた状態で放置すると、他の物に色移りする場合がありますのでご注意下さい。

### 保管方法

- 直射日光や高温を避け、湿気の少ない風通しの良い場所に保管して下さい。

### 廃棄方法

- 本品は布製品です。通常可燃物として廃棄して下さい。（地域により異なる場合がありますので詳しくは自治体へご確認下さい。）



※パッケージ写真・イラストは実際の商品ブランドマークと異なる場合がございますが、商品機能上、問題なくご使用いただけます。

右フリー	手首周囲 13～21cm	左フリー	手首周囲 13～21cm
------	-----------------	------	-----------------

検品印	ご連絡先	ダイヤ工業株式会社 CSセンター 〒701-0203 岡山市南区古新田1117-1 TEL(086)282-1245 FAX(086)282-1246	素材表示	ナイロン ポリウレタン ポリエチレン



Lot. No **407772**