


棒担架



拡げて裏面のバーを固定して出来上がり！（耐荷重～160kg）

【取扱説明書】

- ケースの中から担架を取り出して下さい。
- 4つに折り畳んである担架を外側から順に拡げ、内側のハンドルが外側になるように広げて下さい。
（パイプの折り目に指を挟まないようにご注意ください。）
- 広げる際に担架の裏面のバーを押して固定して下さい。
- バーを固定したら、ハンドル横の突起棒が地面につくよう担架の表を上に向けて下さい。
- 担架に傷病人を乗せる際は、必ず安全ベルトを締め、速やかに安静に搬送して下さい。

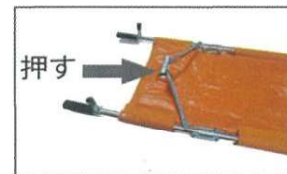

裏面



裏面

【注意事項】

- この製品は、傷病者を危険な場所から安全な場所に移動させるためのものです。傷病者の緊急搬送以外の使用はご遠慮下さい。
- 傷病者を担架に移動するのではなく、傷病者を抱き上げ、その下に担架を置き収容して下さい。抱き上げるときには頭部が動かないように気をつけてください。
- 搬送をする際は、傷病者に苦痛を与えず安全に搬送することが大切です。原則として足側を前にして搬送し、振動などを少なくするよう心がけて下さい。
- 普段重たいものを持ち慣れない人が担架を持つ場合は、腰を痛める可能性がありますので、注意して下さい。
- 保管に関しては、清潔で湿気の少ない所で保管して下さい。
- 緊急時にきちんと使用出来るよう、破損や紛失などを定期的にご確認下さい。

発売元



株式会社

TOTAL SAFETY SYSTEM

グリーンクロス

MADE IN CHINA