



Design Your Voice

Hakuzo

ラテックスフリー

未滅菌

HAKUZO

パウダーフリー

NITRILE GLOVES **ES**

200枚入

ハクゾウ ニトリルグローブ

耐薬剤性、伸縮性に優れ、
手にフィットするニトリルグローブ。

ラテックスフリー素材を使用。
ラテックスアレルギーの方にも
安心してご使用頂けます。



ハクゾウメディカル株式会社

製品特長

- 優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
- テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
- 薬剤に対するバリア性に優れています。
- ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用頂けます。
- パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。



寸法	材質 ●ニトリルゴム	
サイズ	全長	掌の幅
XS	240mm ±10mm	75mm ±5mm
S	240mm ±10mm	85mm ±5mm
M	240mm ±10mm	95mm ±5mm
L	240mm ±10mm	110mm ±5mm

品質基準	ピンホール	AQL1.5
------	-------	--------

装着手順



脱着手順



化学療法剤透過試験

ハクゾウニトリルグローブESは、以下の濃度の薬剤において浸透試験が『ASTM D 6978-05』の基準により実施されています。

試験法	薬剤名	濃度	透過時間
ASTM D 6978-05	メトレキサート	25.0mg/ml (25,000 ppm)	240分まで浸透せず
	シスプラチン	1.0mg/ml (1,000ppm)	
	シクロホスファミド	20.0mg/ml (20,000ppm)	
	ダカルバジン(DTIC)	10.0mg/ml (10,000ppm)	
	塩酸ドキシロピジン	2.0mg/ml (2,000ppm)	
	エトポシド	20.0mg/ml (20,000ppm)	
	5-フルオロウラシル	50.0mg/ml (50,000ppm)	
	パクリタキセル	6.0mg/ml (6,000ppm)	
	硫酸ビンクリスチン	1.0mg/ml (1,000ppm)	
	マイトマイシンC	0.5mg/ml (500ppm)	

耐薬品性試験

ハクゾウニトリルグローブESは、水酸化ナトリウムにおいて浸透試験が『EN374-3』の基準により実施されています。

試験法	薬剤名	濃度	透過時間
EN374-3:2003	水酸化ナトリウム	40%	480分まで浸透せず

品番	サイズ	包装	1梱入数	JANコード
3024071	XS	200枚	12箱	4 958286 706337
3024072	S	200枚	12箱	4 958286 706344

品番	サイズ	包装	1梱入数	JANコード
3024073	M	200枚	12箱	4 958286 706351
3024074	L	200枚	12箱	4 958286 706368

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
 TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 本社営業部 ☎06-6809-4318 | 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 |
| 東京支店 ☎03-3522-6720 | 阪神営業所 ☎078-262-1634 |
| 北大阪支店 ☎072-653-4045 | 広島営業所 ☎082-849-4188 |
| 南大阪支店 ☎0721-20-2900 | 四国営業所 ☎0875-52-6900 |
| 神戸支店 ☎078-976-8901 | 北九州営業所 ☎093-617-3911 |
| 仙台営業所 ☎022-399-7091 | 福岡営業所 ☎092-481-5921 |
| 西東京営業所 ☎042-646-0451 | 熊本営業所 ☎096-345-2253 |
| 三河営業所 ☎0564-54-5447 | 沖縄駐在所 ☎098-941-5320 |
| 三重営業所 ☎059-350-3844 | 札幌駐在所 ☎011-788-8009 |
| 京都営業所 ☎075-603-4826 | |