

—— 密着アーチ形状 ピッタ・マスク2.5a ——

PITTA[®]2.5_a

—— MASK ——

N95規格相当の特殊帯電フィルター採用/PM2.5対策に
微粒子・ウイルスの侵入を徹底ガードしながら息がしやすい。


| 0.0001mmの微粒子・ウイルス99%カットフィルター※1

| アーチ形状で隙間をつくらない | 密着するのに息がしやすい

抗菌防臭・
抗アレルゲン加工



N95規格相当の
特殊帯電フィルター

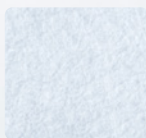

密着
アーチ形状



息がしやすい
形をキープ



日本製



密着アーチ形状 PITTA MASK® 2.5a ピッタ・マスク2.5a

—— 微粒子・ウイルスの侵入を徹底ガードしながら息がしやすい。——

高機能フィルターを3層構造に

【外層】

銀系抗菌剤加工で捕集した菌の増殖を抑制。
(すべての細菌の増殖を抑制するわけではありません。)

【中間層】

N95規格相当の**特殊帯電**フィルターで空気中の
微粒子(0.0001mm)・ウイルスを99%カット※1。
しかも通気性が高く息がしやすい。〈フィルター性能〉


【口元層】

型くずれしにくく、口元に空間を作って
息苦しさを解消。



高い捕集性能と息のしやすさを両立

【10製品フィルター性能比較】

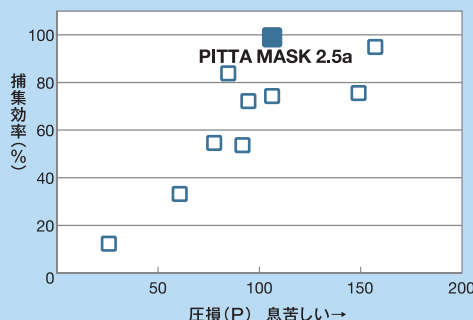

N95 規格フィルター性能試験 (自社調べ)

[流量 85L/min 中、0.0003mm 以上の微粒子捕集効率が 95%以上]

【帯電フィルター比較】

【高配向分極】PITTA MASK 2.5a
一定方向に高度に配列した分極構造により強力な電界を作り、優れた捕集性能と通気性を両立。



【ランダム配向分極】従来不織布
ランダムな分極では電界が弱まる。



矢印は、電気分極の方向
(イメージ図)

アーチ形状で隙間をつくらない

アーチ形状で頬にぴったり密着し、微粒子・ウイルスが侵入する隙間をつくらない。


UVカット機能付き

UVカット機能付きだから、紫外線対策もできる。




【使用方法】

1

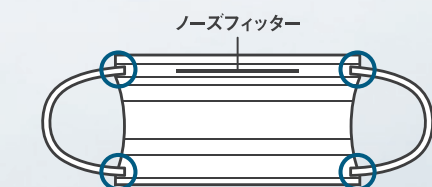

耳ゴムがついている方を外側にします。

2

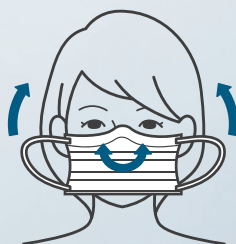

耳ゴムを両耳にかけ、ノーズフィッターを鼻の形に合わせます。

3



ノーズフィッターを押さえながら、あごまで覆うようにブリーツを広げます。

※1 フィルター捕集効率試験/BFE、VFE、PFE、花粉
※2 紫外線遮へい率試験



品 名	PITTA MASK 2.5a
サ イ ズ	レギュラー(175mm×95mm)
対 象	風邪、花粉、ホコリ、PM2.5等
容 量	5枚入り
小 売 価 格	オープン価格
個 装 サ イ ズ (幅×高さ×奥行き)	130mm×235mm×8mm
内 袋 入 数	10袋
JANコード	4 987009 157057

【使用上の注意】●本品は有害な粉塵やガス等が発生する場所での使用はできません。●皮フに異常がある場合や、異常が現れた場合はただちに使用を中止してください。●マスクを着用中、臭いで気分が悪くなった場合には使用を中止してください。●乳幼児の手の届かない所に保管してください。●高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での保管は避けてください。●本品は使いきり製品です。洗濯などによる再使用はできません。●個人差により、眼鏡がくもることがあります。運転の際などは十分に注意してください。●金属に対してアレルギー症状のある方、またはアレルギーが疑われる方は使用しないでください。

【製品に関するお問い合わせ先】

アラクス マスク相談室 TEL 052-951-8880

【受付】9:00~16:30(土・日・祝日を除く)

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26

株式会社 アラクス 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26

マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。