



ディスポーザブルグローブ

プラスチックグローブ



“オオサキ PPEホルダーソフト”
にぴったりと収まります。

業務軽減と環境に配慮した
大容量タイプのプラスチックグローブです。



商品特長

1 業務軽減と環境に配慮した大容量タイプ

- 200枚入りの大容量にすることで、包装箱の交換回数が減り、払い出しや設置業務の軽減につながります。
- 一般的な100枚入りの包装箱2箱分に対して、容積を23%削減したコンパクト包装により、収納保管スペースを抑えられます。また、包装廃棄物の削減にもつながります。

2 指先までフィットし、看護・介護に最適

- やわらかく、薄手のため、指先までフィットし、細かい作業が必要な看護・介護に最適です。

3 肌にやさしい素材

- 天然ゴムやパウダーを使用していないため、ラテックスアレルギーやパウダーアレルギーが心配な方も使用できます。

4 片手でも使えて経済的

- 左右両用のため、片手だけでも使用でき、経済的です。

5 選べるサイズ展開

- 包装箱の裏面には、おおよそのサイズがわかるよう、サイズガイドが付いています。
- ひと目でサイズを識別できるように、包装箱を色分けしています。

商品情報

■ 着脱方法

着け方




手を入れ、袖口の部分をつかんで装着します。

外し方



片方の手袋の袖口(外側)をつかみます。

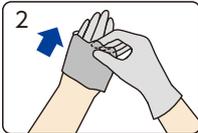

手袋を裏返すように外します。



手袋を着けている手で外した手袋をにぎり、反対側の手を手袋の袖口に差し込みます。




汚染部に触れないよう、手袋を裏返すように外し、先に脱いだ手袋を包み込みます。



外した手袋は2枚がひとつかたまりになった状態ですぐに廃棄してください。

■ サイズガイド

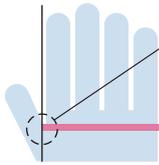

1. 人差し指の付け根を合わせます。

2. 手の甲の右端が破線縦ラインと合ったサイズが目安になります。

S M L

■ バリエーション

種類	サイズ(全長×手のひらの幅)
S	24cm× 8.5cm
M	24cm× 9.5cm
L	24cm×10.5cm

■ 素材

塩化ビニル、可塑剤

※ラテックスフリー(天然ゴムラテックス由来のたんぱく質を含みません)

関連商品



グローブ・エプロン用(2509S)

オオサキ PPEホルダーソフト

- 安全性と機能性に優れたPPE(個人防護具)専用ホルダーです。
- プラスチック板を使用しているため、経済性に優れています。
- 別売りの“マグネット”や“フック”などを使用することで、壁や回診車などに簡単に設置できます。

商品規格

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))	重量	梱入数	JANコード / ITFコード
70011	オオサキ プラスチックグローブ S 200枚入 手のひらの幅8.5cm×24cm	販売単位 245 × 80 × 128	775.0g	12箱	4971032700113 14971032700110
		外装 495 × 260 × 268	9.4kg		
70012	オオサキ プラスチックグローブ M 200枚入 手のひらの幅9.5cm×24cm	販売単位 245 × 80 × 128	875.0g	12箱	4971032700120 14971032700127
		外装 495 × 260 × 268	10.6kg		
70013	オオサキ プラスチックグローブ L 200枚入 手のひらの幅10.5cm×24cm	販売単位 245 × 80 × 128	975.0g	12箱	4971032700137 14971032700134
		外装 495 × 260 × 268	11.8kg		

◇ 商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
<https://www.osakimedical.co.jp/>

※規格には誤差が生じる場合があります。



オオサキメディカル
公式サイト

取扱店