

「日常生活での聞こえづらさを解消！」

集音器とは思えないスタイリッシュなデザイン

KO288

ワイヤレス集音器

音量を5段階で調整可能

大きくクリアな音質で
快適な聞き取りやすさを実現します。

両耳
セット

超軽量
片耳3.5g

簡単
操作



ワイヤレス集音器とは

集音器とは、日常生活で聞こえてくる音を大きくし、聞こえにくさを軽減する便利なアイテムです。

耳の穴にいれて集音するタイプは、小型で目立ちにくく、自然な音になりやすい特長があります。



ワイヤレス集音器の特長

付けたままで音量を簡単操作
タッチするだけで5段階で音量調整

コンパクトでスタイリッシュなデザイン
最大19時間連続使用が可能



使用方法

● 集音器を耳に装着し、音量を調整



1. 集音器を耳に装着します。
2. 集音器本体のタッチキー部分をタッチして音量を調整します。
音量は5段階で調整できます。
タッチするたびにブザー音が2回鳴り、音量が切り替わります。
最大音量ではブザー音が3回鳴ります。

● 電源のON/OFFと充電



1. 充電ケースから集音器を取り出すと自動的に電源がONになります。
2. 集音器を充電ケースに戻すと電源がOFFとなり、充電が開始されます。
3. 手動で電源をON/OFFする場合は、タッチキーを約7秒長押しします。
(インジケーターが緑色に3回点滅します。)

〈セット内容〉



① 集音器×2



② 充電ケース×1



③ 充電ケーブル×1




④ クリーニングブラシ×1



⑤ 取扱説明書×1

各部の名称

■ 集音器

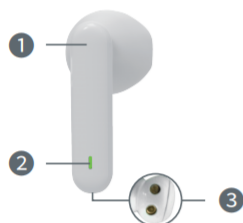

- ① 電源/音量調整タッチキー
- ② 充電インジケーター/マイクポート
- ③ 充電端子

■ 充電ケース



- ④ 充電インジケーター
- ⑤ 充電口



商品仕様

商 品 名	RABLISS ワイヤレス集音器	本 体 重 量	約36g (集音器+充電ケース)
型 番	KO288	最大出力音圧レベル	≤115dB±3dB
J A N	4573284126132	平均出力音圧レベル	113dB±4dB
電 源	内蔵リチウムバッテリー	最 大 音 響 利 得	35dB±5dB
定格消費電流	≤5mA	平 均 音 響 利 得	30dB±5dB
ケ ー ス 入 数	100台	周 波 数 幅	200Hz～5000Hz
寸 法	58×50×24mm (充電ケース)	販 売 元	小林薬品株式会社

※ 本商品は音を集めて大きくする集音器であり、医療機器の補聴器ではありません。

MADE IN CHINA

販売元: 小林薬品株式会社 大阪市中央区南船場3-6-5 TEL: 06-6314-6185 Email: sales@kobayashiyakuhin.com

● 本資料は営業用の為、あくまで社内用としてご使用ください。● 商品のデザイン、仕様は改善等のため予告なく変更する場合があります。● 写真・イラストはイメージです。